

Mascherina chirurgica standard

1. MODALITÀ DI USO: è importante indossare e smaltire la mascherina in maniera corretta, altrimenti può costituire una fonte di infezione per i germi che potrebbero essere su di essa.

Prima di aprire la confezione delle mascherine o estrarne una è necessario il lavaggio delle mani.

Per indossarle correttamente:

- ✓ Lavarsi le mani;
- ✓ Sistemare la mascherina sul viso in modo da coprire naso e bocca;
- ✓ (se con lacci) Posizionare i lacci superiori, stringerli e legarli in modo da mantenere il lembo superiore della mascherina sul naso e la mascherina aderente al viso;
- ✓ (se con lacci) Posizionare i lacci inferiori sulla nuca, stringerli e legarli in modo da far aderire bene la mascherina al viso;
- ✓ (se con elastici) inserire le dita in entrambi gli elastici (dalla parte esterna) e aprendo la mascherina portare gli elastici dietro le orecchie;
- ✓ Tirare la mascherina chirurgica dall'alto e dal basso per aprire le pieghe e distenderla completamente sul viso;
- ✓ Modellare la barretta sul naso in modo da aver la massima adesione al viso;
- ✓ Mentre si indossa la mascherina evitare di toccare la mascherina con le mani e se proprio necessario effettuare il lavaggio prima e dopo aver toccato la mascherina.

Per toglierle:

- ✓ Lavarsi le mani
- ✓ (se con lacci) Sciogliere i lacci inferiori;
- ✓ (se con lacci) Sciogliere i lacci superiori avendo cura che la mascherina non cada;
- ✓ Portare lentamente in avanti le mani;
- ✓ Gettare la mascherina all'interno di un sacchetto di raccolta che deve essere dedicato alle mascherine e deve essere smaltito avendo cura di non toccare le mascherine all'interno;
- ✓ Lavarsi le mani

IMPORTANTE:

La mascherina deve essere sempre indossata garantendo la copertura di naso e bocca.

La mascherina non deve essere abbassata per parlare con i clienti.

Deve essere rispettato in ogni caso il "distanziamento sociale" di metri due (Ordinanza 40 del 13_04_2020).

