



CODICE MAGAZZINO		1075195	
PRINCIPIO ATTIVO		Perossido di idrogeno (1,5%)	
NOME COMMERCIALE ¹		INCIDIN OXYFOAM	
INDICAZIONI D'USO			<p>Pulizia e disinfezione delle superfici di dispositivi medici come monitor touch screen, microscopi, lampade, manipoli, smartphone, tablet, ecc., in ambiente ospedaliero e studi odontoiatrici.</p> <p>Pulizia e disinfezione di sonde ed incubatrici</p> <p>Non adatto per la disinfezione finale di dispositivi medici invasivi.</p>
MODALITÀ D'USO			<p>Prodotto pronto all'uso.</p> <p>Applicare la schiuma detergente/disinfettante direttamente sulla superficie, da una distanza di circa 30 cm, oppure su una salvietta pulita. Strofinare distribuendo il prodotto sull'intera superficie da trattare. Lasciare asciugare.</p> <p>Non risciacquare.</p>
AVVERTENZE SICUREZZA			<p>Il prodotto deve essere conservato nei contenitori originali a meno di 25°C in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce diretta del sole.</p> <p>Incompatibile con sostanze riducenti, ioduri, alcali, iodio, permanganati, iposolfiti, sali ferrosi. Non deve essere utilizzato con altri antisettici e disinfettanti.</p> <p>Non applicare su superfici sensibili agli agenti ossidanti come marmo, rame ed ottone.</p> <p>La validità della confezione integra è di 2 anni.</p>
PITTOGRAMMI DI RISCHIO			
DPI			
SPANDIMENTO			<p>KIT STANDARD Per quantità inferiori al litro</p> <p>KIT AVANZATO  Per quantità superiori al litro</p>

¹ La presente scheda non sostituisce la scheda dati di sicurezza e la scheda tecnica, che vanno consultate preventivamente dal lavoratore. Non vengono sostituite le procedure e istruzioni operative aziendali e di U.O.